

ECO pikakäyttöohje:

1. Koneen virta päälle
2. Imupussin tulee avautua tyhjiössä kokonaan taitoksista. Aktivoi tyhjiö painamalla ON/OFF –näppäintä VACUUM. Paina kevyesti kannesta samalla kun suljet sormella kulmaliittimen. Paina VACUUM pois päältä.
3. Nestepussin lisääminen puntariin.
4. Irrota vihreä infiltraatiopumpun suljinkansi kiertämällä kantta vasemmalle
5. Biofill-letkusto steriliistä pakkauksesta: valkoinen anturi paikalleen; ohut letku ylöspäin, kaksoisletku `jalat`alaspäin. Suljinkansi takaisin paikalleen (punainen merkki sokkelin yläreunaan ja käännä oikealle).
6. Viivakoodinlukija tunnistaa biofill-letkuston; yrityksen logo alkaa vilkkumisen sijaan palamaan jatkuvasti. Samoin Flow-valo alkaa vilkkumaan. Vesisuihku on käytettävissä.
7. Tippaletkujen liittimet kiinni: toinen pussiin, toinen pidikkeeseen. Letkut kiinni. Avaa kummatkin letkupuristimet. Raota pidikkeessä olevan letkun suojusta, jotta ilmakukuplat poistuvat ja pieni määrä vettä valuu ulos. Sulje pidikeletku.
8. Napsauta instrumentti kiinni letkustoon.
9. Työnna imuletkun toinen pää Biofill- aplikaattorin käsikappaleeseen, toinen pää laitteen imukannuun.
10. Letkuston täyttö ennen toimenpiteen aloitusta: kytke vesisuihku painamalla ON/OFF –näppäintä FLOW.
11. Aktivoi vesisuihku painamalla jalkapoljinta (LED valo palaa jatkuvasti). Nyt Biofill-aplikaattori ilmautuu ja parin sekunnin päästä kapillaarisuuttimesta pitäisi tulla suora pistesuihku.
12. Hoidon lopettaminen: kytke laite pois päältä, irrota infiltraatiopumpun kiinnityskohdan suljinkansi. Paina poistonäppäin (Eject) pohjaan. Pidä sitä painettuna ja irrota samalla infiltraatiopumppu kiinnityskohdasta.