

Pikakäyttöohje

THD (transanal haemorroid deartelization) laitteen valmistelu ja käyttö



1. Avaa THD-setin pakkaus. Pakkauksen päällä on kuvitettu ohje valopään ja ultraäänianturin liittämistä anoskooppiin ja sen liukuvan kansiosan työntämisestä paikoilleen.
2. Liitä valokaapeli THD laitteeseen työntämällä paksumpi pää valokaapelin liittimeen laitteessa. Kierrä ohuempi pää anoskooppiin asetetun valopään liittimeen.
3. Varmista että jalkapoljin on kytketty laitteen takana olevaan liittimeen. Jalkapolkimen avulla voidaan katkaista ja aktivoida ultraäänen kuuluminen.
4. Kytke laitteen takana oleva kytkin asentoon 1. HUOM. Älä sammuta laitetta virtakytkimestä ennen kuin koko toimenpide on ohi, koska muuten joudut ottamaan käyttöön uuden ultraäänianturin. Etupaneelin näyttöön tulee teksti THD EVOLUTION the painless surgery for haemorrhoids insert transducer.
5. Liitä ultraäänianturin liitin laitteen etuosassa olevaan liittimeen, se menee paikalleen vain yhdessä asennossa
6. Laitteen näyttöön tulee teksti: Usable surgery:nn, Tranducer OK , press start (▶) when ready
7. Kun olet valmis aloittamaan toimenpiteen paina (▶) painiketta ja näyttöön tulee aika 90:00 ja valolähteen lamppu syttyy. Aikalaskuri alkaa kulua alaspäin ja kun 1 minuutti on jäljellä ilmoittaa laite äänimerkillä ajan loppuun kulumisesta. Kun aika on täynnä laite sammuttaa valon ja ultraäänianturin automaattisesti.
8. Laitteen etuosassa olevasta nupista voidaan säätää äänitasoa toimenpiteen aikana
9. Jos toimenpide päättyy ennen 90 minuutin täyttymistä paina tällöin (■) painiketta ja odota 5 minuuttia ennen kuin sammutat virtakatkaisimesta laitteen (ehtii jäähtyä).
10. Ongelmatilanteissa soita 010-8354500 tai info@upviser.fi