

## CYTORI CELBRUSH™ KOKOAMINEN

Celbrush™ koostuu (1) kahvasta, (2) hammasrattaasta sekä (3) adapterista ja (4) kehyspuikosta. Celbrush™ pitää käyttää liitettynä hyväksyttävän kokoiseen, steriiliin, kertakäyttöiseen Soft-Ject ruiskuun.

Kokoa **steriili** laite kuten alla olevassa kuvassa näytetään

1. Ruuvaa kahva kiinni hammasrattaaseen
2. Napsauta adapteri kiinni hammasrattaaseen
3. Poista kuminen männän pää Soft-Ject ruiskun männästä ja kiinnitä se kehyspuikkon päähän
4. Liu'uta kehyspuikko adapterin läpi pohjaan asti
5. Lisää Soft-Ject ruiskun runko koko kokoonpanoon ja lukitse adapteriin pyörittämällä ruiskun runkoa 90 astetta myötäpäivään.



(KUVA)

### **Celbrush™**

1. kahva
2. hammasratas
3. adapteri
4. kehyspuikko