

LipoCube NanoCuben käyttöohje

NanoCube

1. Tarkasta NanoCuben pakkauksen avaamisen jälkeen, että kannessa on teksti ”Lipocube” ja kannen kummallakin puolella on merkki ”●”.
2. Merkki ”●” osoittaa käsitellyn rasvan virtauksen. Luer Lock-liittimiin asetettavien ruiskujen on oltava näiden kahden pisteen kohdalla. Jos liitäntää ei tehdä tällä tavalla, laite ei toimi.
3. Tarkasta NanoCuben merkinnät 1, 2, 3 ja 4.
4. Varmista, että ruisku jossa on rasva asetetaan aina ensimmäisenä porttiin 1.
5. Näin varmistetaan, että rasva käsitellään asianmukaisesti eikä rasvaa mene hukkaan.


1. NANOCUBE – KÄYTTÖOHJE

NanoCube-toimenpiteessä voidaan käsitellä rasvaa enintään 60 ml.

• NanoCube-prosessi


MILLIRASVASTA MIKRORASVAAN

- *Liitä 20 ml:n ruisku, jossa on millirasva, porttiin 1.*
- *Liitä tyhjä ruisku porttiin 2.*
- *Tarkasta yläkannen asento. Pisteiden täytyy olla porttien 1 ja 2 kohdalla.*
- *Siirrä millirasva portista 1 portin 2 ruiskuun yhdellä männän painalluksella.*
- *Portin 2 ruiskussa on nyt mikrorasvaa.*

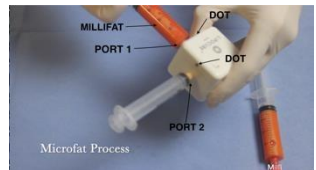


EMULGOINTIVAIHE

- *Vaihda yläkannen asentoa. Pisteiden täytyy olla porttien 2 ja 3 kohdalla.*
- *Liitä ruisku, jossa on mikrorasva, porttiin 2 ja tyhjennä ruisku porttiin 3.*

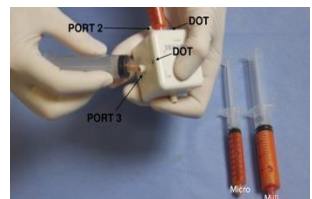



- Siirrä mikrorasvaa porttien 2 ja 3 ruiskujen välillä 5-10 kertaa, jotta mikrorasva emulgoituu.
- Siirrä emulgoitu mikrorasva portin 3 ruiskuun.

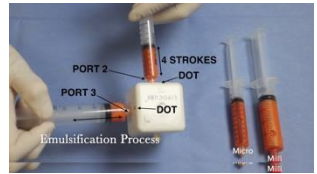

MIKROKORASVASTA NANORASVAKSI

- Vaihda yläkannen asentoa. Pisteiden täytyy olla porttien 3 ja 4 kohdalla.
- Irrota tyhjä ruisku portista 2 ja siirrä se porttiin 4.
- Siirrä emulgoitu mikrorasva portista 3 portin 4 ruiskuun yhdellä männän painalluksella.
- Portin 4 ruiskussa on nyt nanorasvaa.



Maahantuoja ja markkinoija:

UpViser Oy
Perintötie 8 C 6
01510 Vantaa
P. 010 835 4500



Edustajat:

Salla Ahdekivi P. 050 – 570 1964 salla.ahdekivi@upviser.fi
 Antonia Pekansaari P. 044 – 971 7791 antonia.pekansaari@upviser.fi Nina
 Kähkönen P. 050 – 476 0277 nina.kahkonen@upviser.fi